



OCON

NOVÁ GENERÁCIA IUD:  
INTRA UTERINE BALL

## Vnútromaternicová loptička IUB™ SCu300A/B

HIGH-TECH antikoncepcia s jedinečným tvarom,  
s účinnosťou 99,87% a s elimináciou možnosti malpozície<sup>1</sup>



**Nosným materiálom pre medené guličky je Nitinol, špeciálna zliatina s pamäťovými vlastnosťami.** Tento materiál je používaný v medicíne napr. pre výrobu implantátov a stentov. 17 medených guličiek o celkovom účinnom povrchu 300 mm<sup>2</sup> je navlečené na nitinolové vlákno kryté polyamidom.

Tube pre zavedenie má priemer 3,2 mm a IUB™ je vhodné aj pre ženy, ktoré nerodili.


### Ďalšie výhody IUB™:

- Jednoduché zavedenie
- Minimálne riziko perforácie<sup>1</sup>
- Minimálna iritácia endometria vďaka malej veľkosti, flexibilita a neprítomnosti ostrých alebo vyčnievajúcich štruktúr.

IUB™ má sférický tvar a je len 15 mm v priemere.

bežná veľkosť „T“ IUD  
28 – 32 mm x 30 – 36 mm


IUB™  
SCu300B  
15 mm

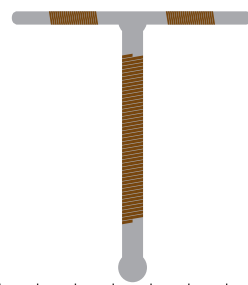

Ilustrácia  
v skutočnej  
veľkosti



# IUB™ TECHNIKA ZAVEDENIA

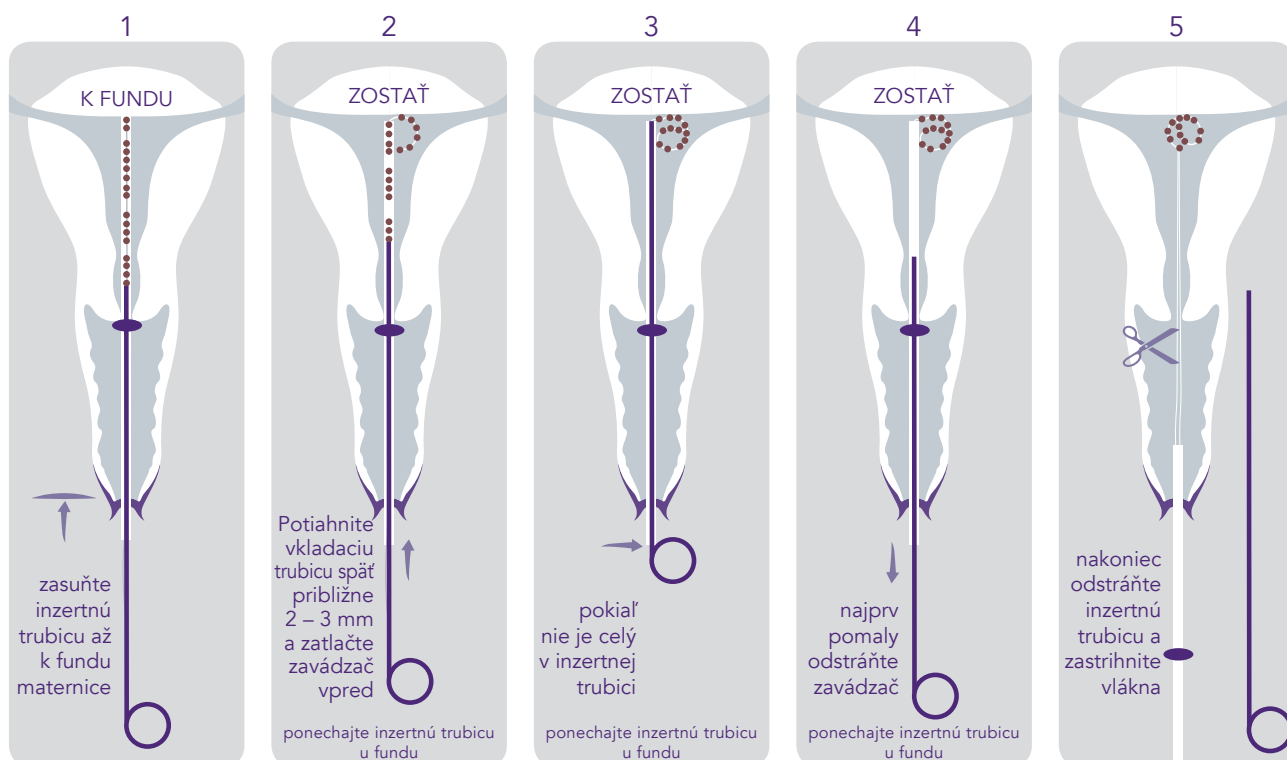

Akonáhle je IUB™ vysunuté z tubusu, ihneď sa začne stáčať o 180 stupňov od fundu matrice. Pretože sa IUB™ stáča späť, malo by byť uvoľňované v blízkosti fundu matrice, aby sme predišli uvoľneniu telieska. Zavedené IUB™ vytvorí v maternici 3-rozmerný sférický tvar.



## Dôležité informácie:

- Exkluzívnu veľkodistribúciu na Slovensku zabezpečuje spoločnosť **MED-ART, spol. s r.o.**
- Viac informácií na [www.iub.sk](http://www.iub.sk) alebo [info@adexilis.com](mailto:info@adexilis.com)

Referencie: 1. Safety and Efficacy of the IUB™ SCu300B (Ballerine™) Following Widespread Use, January 2017, OCON Medical Ltd.